



Hotel Plejsy 23.7.2022

PhDr. Alena Oborilová, Product manager, Lohmann&Rauscher s.r.o.





People.Health.Care.

Lohmann & Rauscher

▪ **nemecko - rakúsky nadnárodný koncern**

» **R. 1851** - vznikol Lohmann Medical v Nemecku

» **R. 1899** - farmaceut Rauscher založil podnik na výrobu
obväzového chirurgického materiálu v Rakúsku

» **R. 1998** - fúzia – Lohmann & Rauscher

Slovenská republika – od r. 1992

hydrovláknité krytia
+ Ag

hydrobalančné
krytia + PHMB

alginátové krytia + Ag

kolagénové
krytia

neadherentné
krytia

Suprasorb a Vliwa

„Na každú ranu ten správny obvaz“

Krytia s aktívnym
uhlím + Ag

penové krytia,
+ so silikónom

absorbčné krytia

hydrogély

hydrokoloidy

fólie



People.Health.Care.

Ošetrovanie s FY Lohmann Rauscher s.r.o.

Penové krytia:

nelepiace penové krytia – ***Suprasorb P***

silikónové krytia – ***Suprasorb P sensitive***

Hydrobalančné a antimikrobiálne krytia:

Suprasorb X a Suprasorb X PHMB

Absorbčné krytia:

Vliwazell PRO

Obväzové produkty:

Gekalast

Lenkideal

Mollelast haft


Tubulárne obvazy: TG, TG soft, TG Grip

Gázové kompresy:

Gazin 5x5, 10 x 10 cm, 7,5 x 7,5 cm – nesterilné a sterilné

Kompresy z netkanej textílie - Vliwasoft, sterilný

Suprasorb P nelepiaci

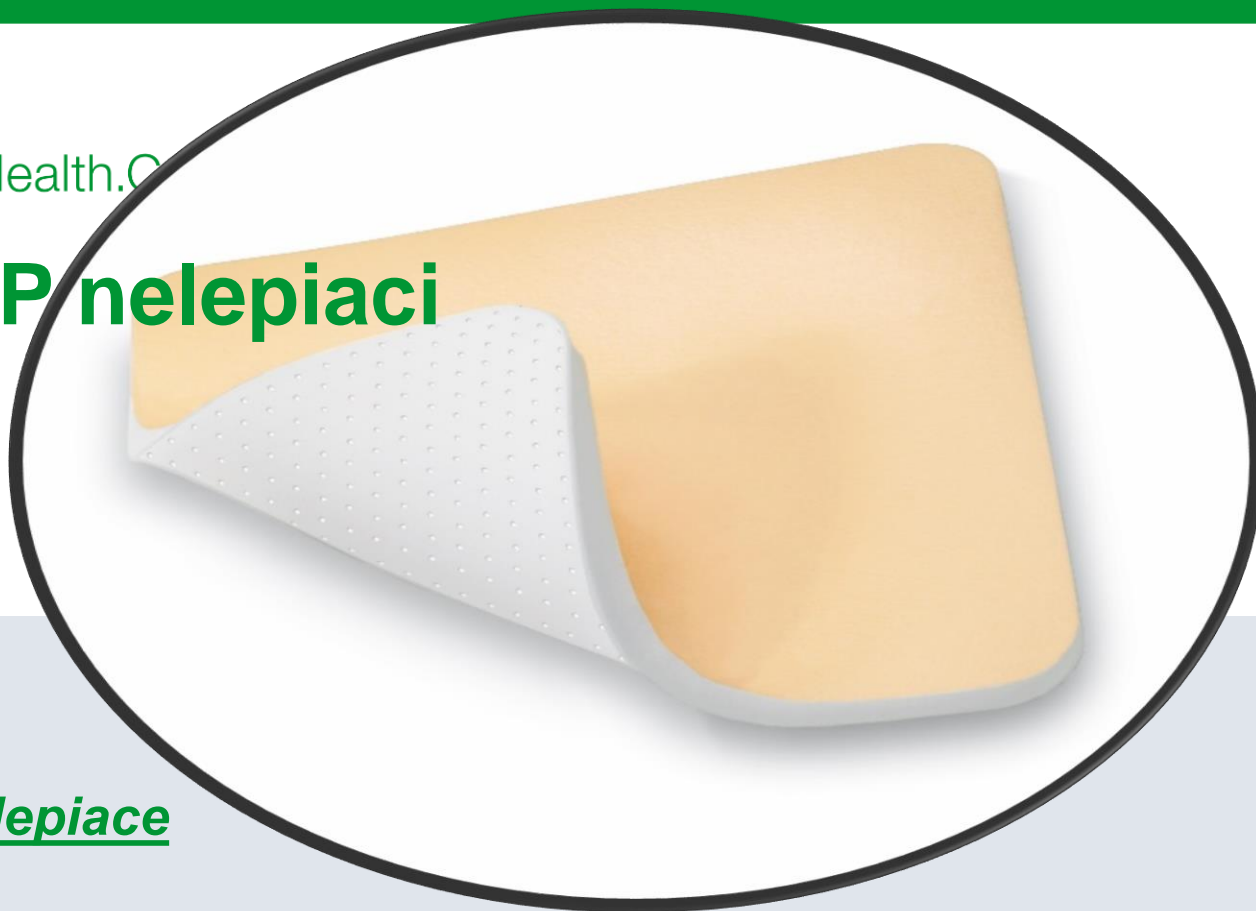


Penové krytie, nelepiace

3 vrstvové

- perforovaná priesvitná kontaktná PU vrstva
- nelepí sa s ranou
- &

Suprasorb P nelepiaci

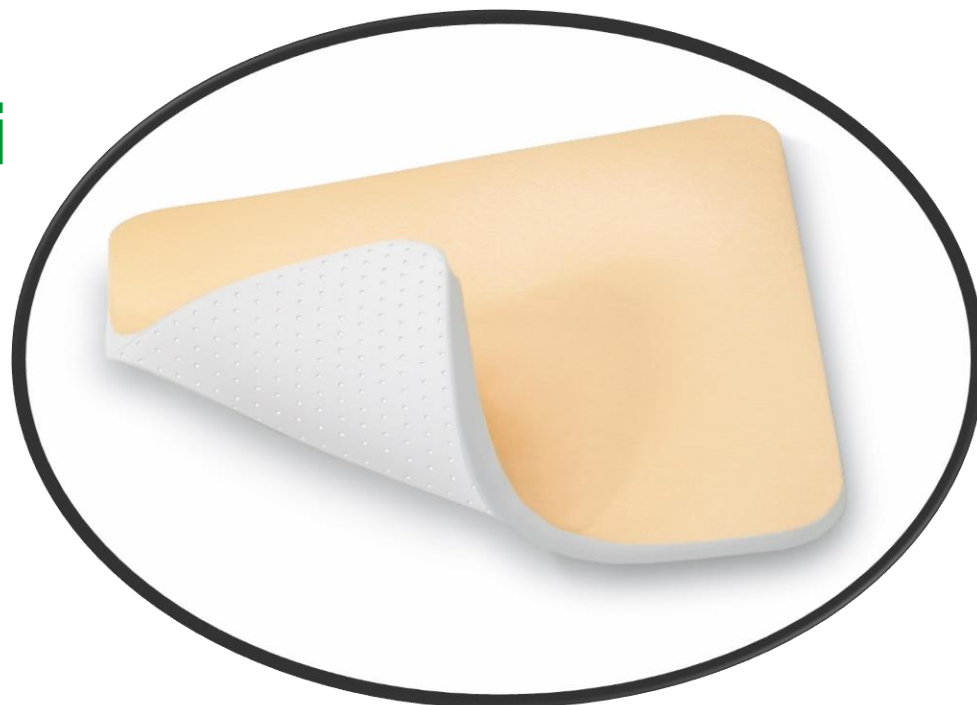

SUKL	Názov	Rozmer	Doplatok	Preskr. obmedzenie
A68842	Suprasorb P PU nelepiaci	10 x 10 cm	0,00 €	DER,ANG,CHI,CCH
A68843	Suprasorb P PU nelepiaci	15 x 15 cm	0,00 €	DER,ANG,CHI,CCH




People.Health.Care.

NOVÉ

Suprasorb[®] P sensitive

penové „sensitive“ krytia

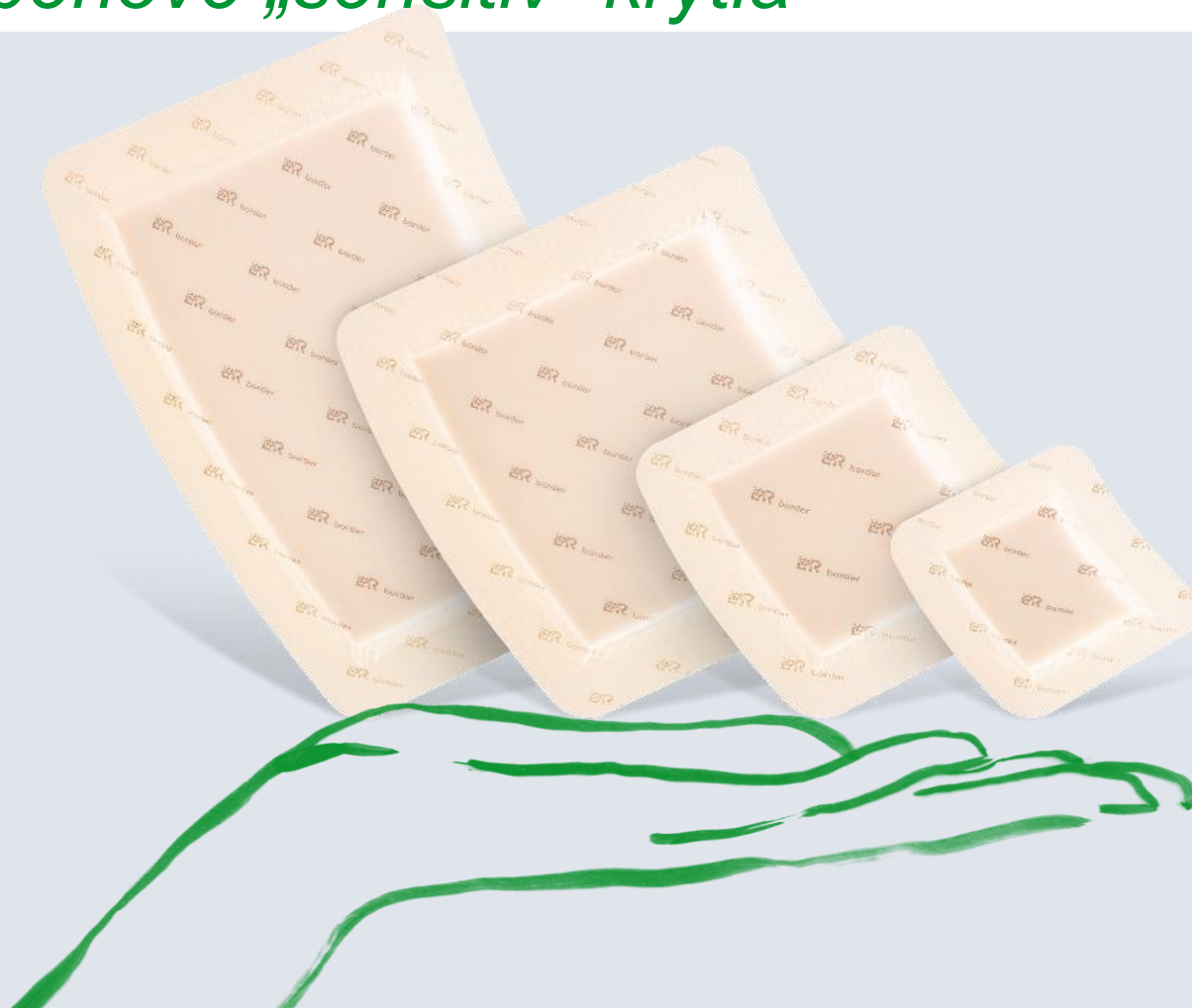

Suprasorb P sensitive – penové silikónové krytia

Dostupný v 3 variantoch

border
5 vrstiev



so superabsorpčným jadrom

border lite
4 vrstvy



bez superabsorpčného jadra

non-border
3 vrstvy




* Nie je kategorizovaný

bez superabsorpčného jadra
bez netkanej textílie

VRSTVY

Border, Lite, Non border detailne

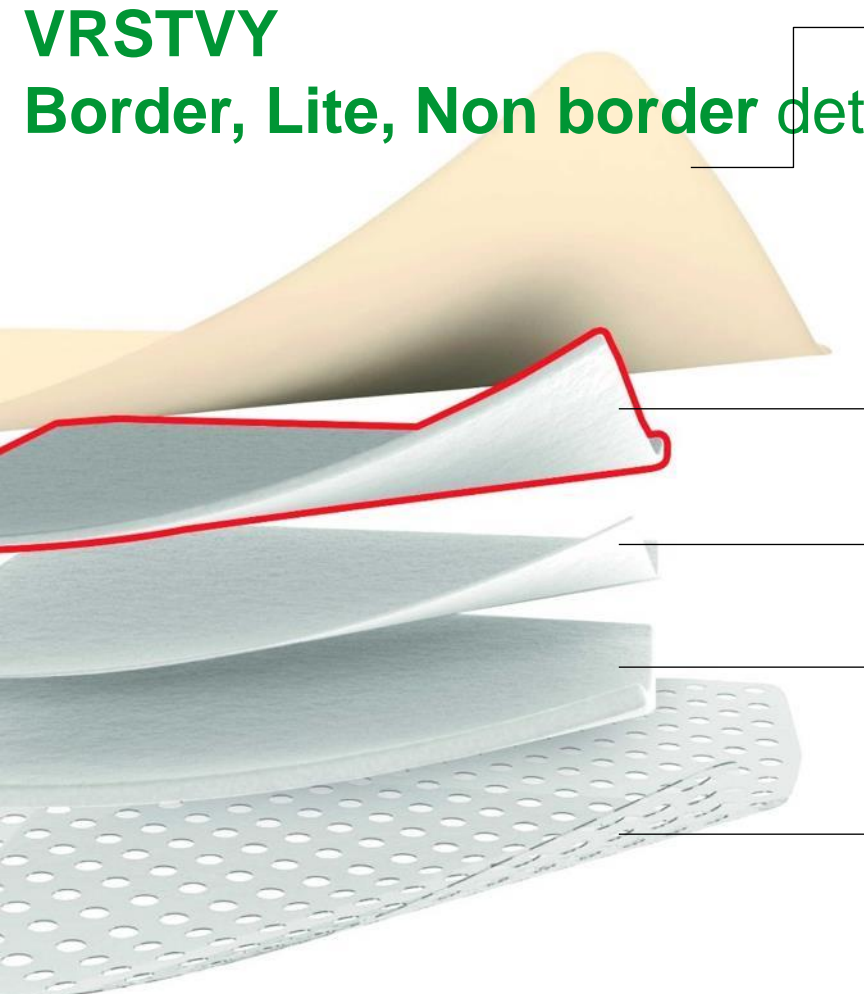

Nosná vrstva PU - ochranná

Superabsorpčné jadro

Vrstva z netkanej textílie – distribučná vrstva

Savá polyuretánová pena

OptiSil silikónová kontaktná vrstva s ranou

- Lite – nemá superabsorbent
- **- Non border nemá Superabsorbent a netkanú textíliu


Suprasorb® P sensitive **NOVÉ**

Formáty

border so
superabsorpčným savým
jadrom



border lite bez
superabsorpčného savého
jadra

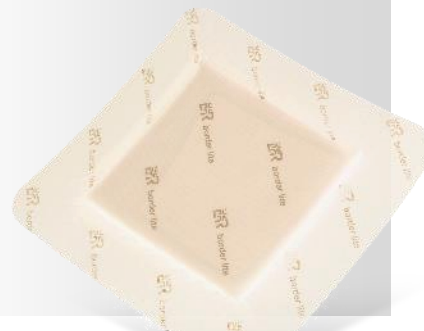

non border bez
superabsorpčného savého
jadra a netkanej textílie



* Nie je kategorizovaný

Špeciálne formáty **Sacrum na krížovú oblasť**

so superabsorpčným savým jadrom



Multisite - rôzne oblasti tela

Suprasorb® P sensitive

SUKL	Názov	Rozmer	Doplatok	Presk. obmedzenie
A0609A	Obväz penový silikónový Suprasorb P sensitive	s lepidým okrajom, 10x10 cm, trieda ZP IIb (aktívna plocha 6,2x6,2cm)	0,00	ANG, CCH, CHI, DER, PCH
A0613A	Obväz penový silikónový Suprasorb P sensitive (LITE)	s lepidým okrajom lite, 10x20 cm, trieda IIb (aktívna plocha 5x15cm)	0,00	ANG, CCH, CHI, DER, PCH
A0610A	Obväz penový silikónový Suprasorb P sensitive	s lepidým okrajom, 15x15 cm, trieda ZP IIb (aktívna plocha 10,5x10,5cm)	0,00	ANG, CCH, CHI, DER, PCH
A0611A	Obväz penový silikónový Suprasorb P sensitive	s lepidým okrajom, 20x20 cm, trieda ZP IIb (aktívna plocha 15x15cm)	0,00	ANG, CCH, CHI, DER, PCH

Suprasorb P Sensitive

špeciálne tvary

SUKL	Názov	Tvar	Doplatok	Preskr. obmedzenie
A0617A	Obväz penový silikónový Suprasorb P sensitive	Sakrálny 17,5 x 17,5 cm	0,00	DER,ANG,CHI,CCH,PCH
A0618A	Obväz penový silikónový Suprasorb P sensitive	Sakrálny 23 x 23 cm	0,00	DER,ANG,CHI,CCH,PCH
A0619A	Obväz penový silikónový Suprasorb P sensitive	Heel, 23,5 x 25 cm	0,00	DER,ANG,CHI,CCH,PCH
A0620A	Obväz penový silikónový Suprasorb P sensitive	Multisite, 12,5 x 15 cm	0,00	DER,ANG,CHI,CCH,PCH

Suprasorb® P sensitive NOVÉ

Prikladanie obväzu (heel - päta)



1. Odstráňte ochrannú fóliu zo strednej časti a príľnavú stranu obväzu umiestnite na zadnú stranu členka.



2. Odstráňte ochrannú fóliu z jednej strany a hornú časť obväzu priložte bez napnutia k členku. Mierne pritlačte.

3. Odstráňte ochrannú fóliu z druhej strany a zopakujte krok č. 2.

Suprasorb® P sensitive **NOVÉ**

Prikladanie obväzu (heel - päta)



4. Dolnú časť krytia založte bez napnutia pod chodidlo.



5. Rozdelené časti krytia uložte na seba a uhlad'ajte okraje.



People.Health.Care.

PENOVÉ KRYTIA - Suprasorb P

**Je Suprasorb
P/silicone
naozajstná pena?**



Suprasorb X, Suprasorb X PHMB – antimikrobiálne krytie




Suprasorb® X a X+PHMB – hydrobalančné krytie

Zloženie:

- Bioaktívna celulóza – acetobacter xylinium

Vlastnosti:

- hydrobalančné
- znižuje bolestivosť
- antimikrobiálne PHMB
- Vyžaduje sekundárne krytie
(Suprasorb P, P sensitive)

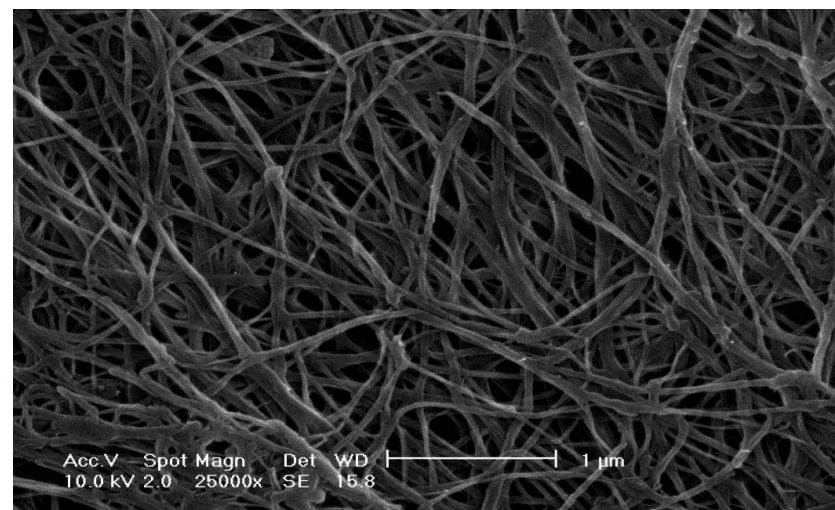

Suprasorb X a Suprasorb X PHMB

SUKL	Názov	Rozmer	Doplatok
A75071	SUPRASORB X	5x5 cm, á 5 ks	0,00 €
A75072	SUPRASORB X	9x9 cm, á 5 ks	0,00 €
A75076	SUPRASORB X + PHMB	9x9 cm, á 5 ks	0,00 €
A75075	SUPRASORB X+PHMB	5x5 cm, á 5 ks	0,00 €
A 75077	Suprasorb X + PHMB	14x20cm / 5ks, antibakteriálne	0,00 €


Vliwazell PRO – absorbčná kompresia



Vliwazell PRO – kompresia zložená z:



Vliwazell® Pro je mäkká savá kompresia so superabsorpčnými vlastnosťami, ktorá sa skladá z:

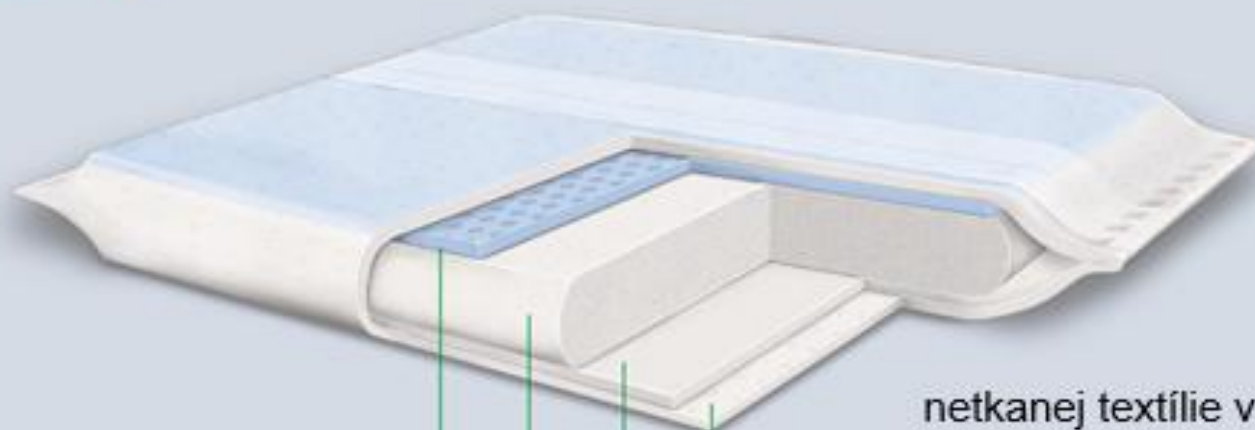

netkanej textílie vo funkcii kontaktnej vrstvy s ranou

distribučnej netkanej textílie

absorpčného jadra

vrstvy na ochranu bielizne

Vliwazell PRO

- vysoko absorbujúca
- mäkká, jemný povrch
- drží tvar po nasatí
- vhodná na tečúce rany



Vliwazell PRO

SUKL	Názov	Rozmer	Doplatok
A1789A	Krytie na rany superabsorbčné Vliwazell Pro sterilné	10 x10 cm, 10 ks	0
A1790A	Krytie na rany superabsorbčné Vliwazell Pro sterilné	10x20 cm, 10 ks	0
A1791A	Krytie na rany superabsorbčné Vliwazell Pro sterilné	15x20 cm, 10 ks	0
A1792A	Krytie na rany superabsorbčné Vliwazell Pro sterilné	20x25 cm, 10 ks	0
A1793A	Krytie na rany superabsorbčné Vliwazell Pro sterilné	20x40 cm, 10 ks	0


Lomatuell PRO

Kontaktná sieťka

- mriežkovaný tyl
- hmota z elastickej matrice z vazelíny a hydrokoloidu
- gélovatie

VLASTNOSTI:

- Pre minimalizáciu prilepenia k rane
- obojstranný
- ✂
- Nie je kategorizovaný

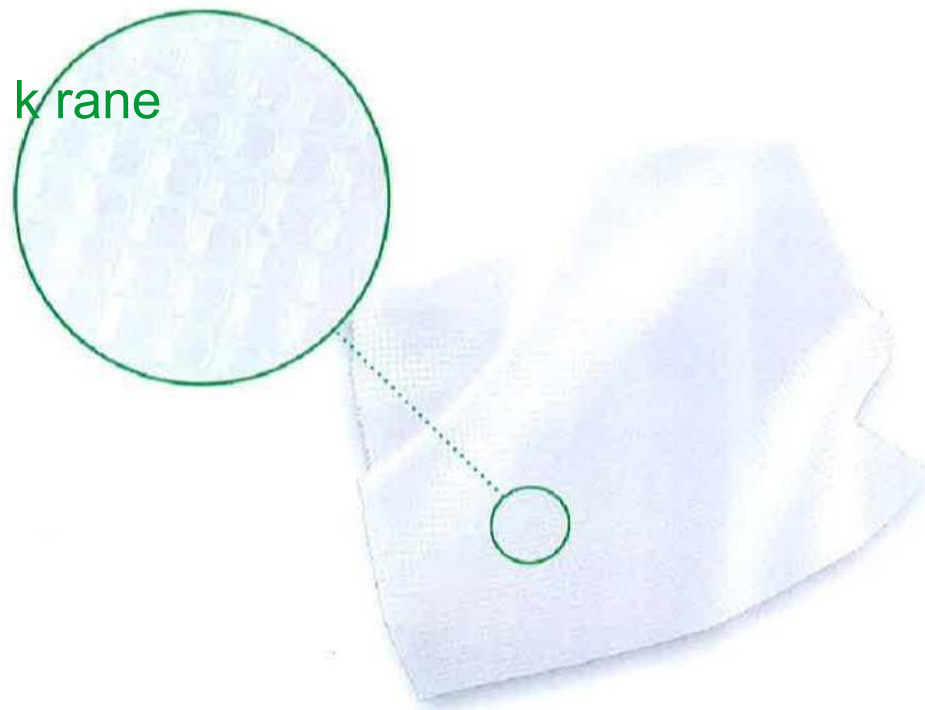

Gázový materiál

-Gázové kompresy sterilné, nesterilné

Krytie k ošetrovaniu rán:

Vliwasoft, Solvaline N

Alumíniová kompresa – Metalline (tracheo), kanyla

Mastný tyl - Lomatuell H (tyl + vazelína)



Gázové kompresy Gazin®



Solvaline® Kompresa na ranu



Metalline® Kompresy



Lomatuell® H



A Metalline® Drenážna kompresa
B Metalline® Tracheálna kompresa

Gázové produkty

Kód	Názov	Doplnok názvu	DOPLATOK
A57022	Gazin, gázové kompresy, nesterilné	5x5cm, á 100 ks	0,00 €
A57023	Gazin, gázové kompresy, nesterilné	7,5x7,5cm, á 100 ks	0,86 €
A57024	Gazin, gázové kompresy, nesterilné	10x10 cm, á 100 ks	0,00 €
A57028	Gázové kompresy, sterilné,	5x5cm, á 2 ks	0,02 €
A57029	gázové kompresy, sterilné	7,5x7,5 cm, á 2 ks	0,02 €
A57031	Gázové kompresy, sterilné	10x10cm, á 2 ks	0,03 €

Vliwasoft - netkaná textília

KÓD SUKL	Názov	Rozmer	Doplatok
A21477	Vliwasoft - kompresy, sterilné, 6 vrstvové	5x5cm, á 2ks	0,00 €
A21478	Vliwasoft - kompresy, sterilné, 6 vrstvové	7,5x7,5cm, á 2ks	0,00 €
A21479	Vliwasoft - kompresy, sterilné, 6 vrstvové	10x10cm, á 2ks	0,00 €
A21480	Vliwasoft - kompresy, sterilné, 6 vrstvové	10x20cm, á 2ks	0,00 €



People.Health.Care.

Obvázový materiál

- Fixačné obvazy

Gekalast, Raucolast, Mollelast, Mollelast haft

- Elastické obvazy

Krátkoľažné – Lenkideal

- Tubulárne obvazy:

TG fix – sieťový

TG grip – elastický

TG zhrňovací

TG trikotový – 100 % bavlna



Obvázový materiál

Kód	Názov	Doplnok názvu	DOPLATOK
Elastické krátkořažné obvazy			
A68262	Lenkideal elastický, krátkořažný	8cmx5m, á 1 ks	0,18 €
A68263	Lenkideal elastický, krátkořažný	10cmx5m, á 1 ks	0,00 €
A68264	Lenkideal elastický, krátkořažný	12cmx5m, á 1 ks	0,00 €
Fixačné obvazy			
A21497	Obváz fixačný Gekalast®	6cmx4m, á 10 ks	0,44 €
A21498	Obváz fixačný Gekalast®	8cmx4m, á 10 ks	0,43 €
A21499	Obváz fixačný Gekalast®	10cmx4m, á 10 ks	0,72 €
A21500	Obváz fixačný Gekalast®	12cmx4m, á 10 ks	0,90 €



People.Health.Care.

Mollelast haft kohezívny fixačný obvaz

Rozmery (cm x m)	REF	Bj
biela farba		
4 x 4	30063	1/120
6 x 4	30064	1/100
8 x 4	30065	1/120
10 x 4	30066	1/120
12 x 4	30067	1/100
4 x 20	30068	1/18
6 x 20	30069	1/18
8 x 20	30070	1/18
10 x 20	30071	1/18
12 x 20	30072	1/18



KONTAKTY:

[https://www.lohmann-rauscher.com/sk-sk/
info@sk.LRmed.com](https://www.lohmann-rauscher.com/sk-sk/info@sk.LRmed.com)

Tel. čísla:

02/54 777 419

02/68 208 064

PhDr. Alena Oborilová

Alena.Oborilova@sk.LRmed.com

Č.t. 0905 737 027

Distribútor zdravotníckych pomôcok:

VZP, lekárne - podľa dohody

<https://alfamedicalteam.com/>



People.Health.Care.

**Východné Slovensko mimo PP,
LE a SNV**

MVDr. Katarína Kliková

e-mail: Katarina.Klikova@sk.LRmed.com

číslo telefónu: 0915 396 723

Stredné Slovensko – Banská Bystrica a juh SK

MVDr. Zuzana Kelecsenyiová

e-mail: Zuzana.Kelecsenyiova@sk.LRmed.com

číslo telefónu: 0905 969 040

Stredné Slovensko – Ilava – Levoča

MVDr. Ladislav Šatan

E - mail Ladislav.Satan@sk.LRmed.com

číslo telefónu 0917 678 533

Západné Slovensko, Bratislava a okolie

Ľubomír Rajto

Lubomir.Rajto@sk.LRmed.com

číslo telefónu: 0908 666 146

Západné Slovensko mimo Bratislavy

Ing. Martin Zaťko

e-mail: Martin.Zatko@sk.LRmed.com

ĎAKUJEM ZA POZORNOST